


Actimove[®]

EpiSport

Elleboogbrace

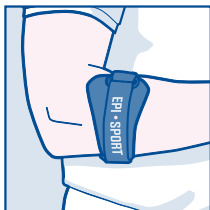

BSN medical



Actimove® EpiSport

Actimove® EpiSport is een speciaal ontworpen elleboogbrace, vervaardigd van elastisch, duurzaam en latexvrij materiaal. De anatomisch gevormde beugel past om de natuurlijke vorm van de elleboog, heeft een optimale pasvorm en verlicht de druk op de spieren. De dunne pelotten met gespsluiting en elastisch klittenband voorkomen afknellen van de bloedvaten, maken een individueel instelbaar drukniveau mogelijk en maken het aanbrengen eenvoudig. De anti-slip en zachte binnenvoering van Actimove® EpiSport garandeert de hele dag een optimale pasvorm en comfort.

Indicaties:

Actimove® EpiSport wordt aanbevolen bij acute en chronische Epicondylitis (tennisarm), zoals Epicondylitis radialis en Epicondylitis ulnaris, veroorzaakt door herhaaldelijke belasting van de pols en onderarm, met name tijdens het golfen of tennissen. De beugel verlicht ongemak en pijn.

Gebruik:

Voor een juist gebruik volgt u de stappen 1 tot 4:

1. Uw Actimove® EpiSport moet rond de onderarm worden bevestigd, circa 5 cm onder de elleboog.
2. Trek het klittenband los en schuif de Actimove® EpiSport rond de arm, waarbij de brede kant in de breedte wordt geplaatst (met de D-ring naar boven) en de opening aan de binnenzijde van de onderarm.
3. Schuif het elastische klittenband door de gesp, totdat de brace nauwsluitend en comfortabel zit.
4. Sluit het klittenband.





Waarschuwing: Het klittenband kan volledig worden verwijderd voor reiniging. Als u het klittenband opnieuw bevestigt aan de brace, dient u de gesp in de richting van de pijl op de huls te bevestigen, zodat een optimale druk is gewaarborgd (zoals afgebeeld op fig. 7).


Reiniging en onderhoud:

Reinig Actimove® EpiSport met de hand in lauwwarm water. Actimove® EpiSport niet wassen in de wasmachine, chemisch reinigen, bleken, in de wasdroger drogen of strijken. Laat het product goed drogen alvorens het opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

Volg de behandeladviezen van uw arts. Wanneer zich tijdens het dragen ongemak, gevoelloosheid, verandering van de huidskleur of zwelling voordoet, de klem niet langer gebruiken en uw arts raadplegen. Raadpleeg uw huisarts voor verder advies als de pijn niet afneemt na Actimove EpiSport enige tijd gebruikt te hebben.

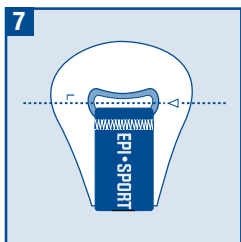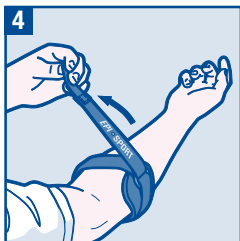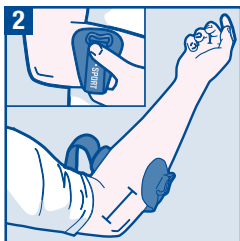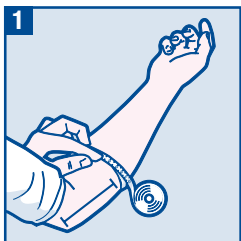

	Size		REF
(AUS) (NZ) (CAN) (GB) (A) (CH)	XS	20-23cm 8"-9"	73470-00
	S	23-25cm 9"-10"	73470-01
	M	25-28cm 10"-11"	73470-02
	L	28-30cm 11"-12"	73470-03
	XL	30-34cm 12"-13,5"	73470-04
	(F) (B) (NL) (E) (I)	XS	20-23cm
S		23-25cm	73470-11
M		25-28cm	73470-12
L		28-30cm	73470-13
XL		30-34cm	73470-14

Actimove®

EpiSport



BSN medical GmbH
D-22771 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

Made in Mexico

W7097-02 JBR04815.05 07/2009