

# Actimove<sup>®</sup>


ManuMotion

life

Polsbandage



**BSN** medical

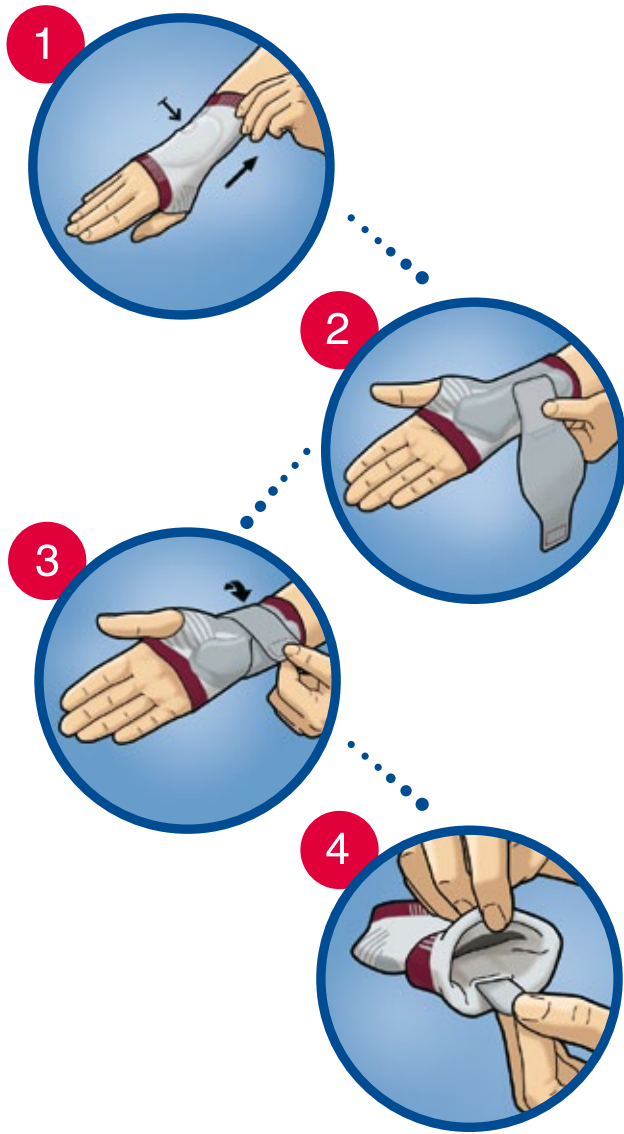

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® ManuMotion.

Actimove® ManuMotion is een anatomisch gevormde polssteun, speciaal ontworpen voor het geven van druk op en het stabiliseren van de pols. Deze polssteun combineert een geavanceerde breistruktuur met hoogwaardige, latexvrije materialen voor een beter ademend vermogen en duurzaam comfort. Het drukkussen op de rugzijde van de hand heeft een voortdurend masserend effect op het zachte weefsel, hetgeen bijdraagt aan de vermindering van oedeem en zwelling. De anatomisch gevormde pelotte aan de binnenzijde van de hand stabiliseert de pols in een functioneel correcte positie, waardoor de pijn wordt verminderd. De Motion Comfort Zone bij de duimopening voorkomt blaren en voelt zacht en soepel aan. Een verwijderbare, niet-rekbare polsband biedt extra, individueel verstelbare stabilisatie van de pols.

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

#### **Indicaties:**

Actimove® ManuMotion is geïndiceerd voor pijnlijke artrose en reumatoïde artritis van de pols, bij verdraaiingen (verstuikingen), tendovaginitis (ontsteking van de peesschede), na letsel aan pezen, letsel aan ligamenten en zachte weefsel van de pols. Gebruik wordt ook aanbevolen bij postoperatieve en posttraumatische irritatie.

#### **Contra-indicaties:**

Gebruik Actimove® ManuMotion niet als u lijdt aan acute fracturen, stoornissen in de lymfedoorstroming of bloedsomloop, met name in handen en vingers.

#### **Toepassing:**

1. Trek de steun over uw hand en zorg ervoor dat uw duim zich in de juiste positie bevindt.
2. De steun heeft de juiste positie als de opening van het drukkussen zich direct boven de uitstulping van de pols bevindt.
3. Voor extra stabilisatie kunt u de polsband aanbrengen; bevestig hiervoor het grijze klittenband aan het omhulsel van

de pelotte. Trek de band vervolgens om uw pols en sluit het klittenband.

4. Om de pelotte te verwijderen (bijv. voor wassen) draait u het onderste deel van uw Actimove® ManuMotion binnenstebuiten en verwijdert u de pelotte uit het vakje. Als u de pelotte weer aanbrengt, dient u ervoor te zorgen dat deze in de juiste richting wordt geplaatst.

**Let op:** Uw Actimove® ManuMotion moet de eerste keer door een behandelaar of daarvoor opgeleide specialist worden aangebracht.

In overleg met uw arts kan het verband ook zonder pelotte en polsband worden gedragen.

#### **Modificatie-instructie:**

De pelotte kan afzonderlijk worden gemodificeerd bij een temperatuur van ongeveer 200 °C. Deze modificatie dient gedaan te worden door een technisch deskundige.

#### **Reiniging & verzorging:**

Actimove® ManuMotion kan met de hand of in de machine worden gewassen (programma voor fijne was op 30 °C, gebruik fijnwasmiddel). Voor uw polssteun geldt: geen bleekmiddel gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen. Let op: Verwijder de pelotte en sluit de polsband, voordat u de polssteun wast!

#### **Voorzorgsmaatregelen:**

U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te volgen. Mocht u tijdens het dragen enig ongemak, een doof gevoel, veranderingen in uw huidskleur of zwelling ervaren, stop dan met het gebruik van Actimove® ManuMotion en neem contact op met uw behandelend arts.

80% Polyamide  
20% Elastane

LATEX  
FREE  
FORMULA



BSN medical GmbH  
D-22771 Hamburg, Germany  
[www.bsnmedical.com](http://www.bsnmedical.com)

Made in Germany

JBR 05677.03 05/2011