

Actimove[®]

TaloMotion

life

Enkelbandage



BSN medical





Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® TaloMotion.

Actimove® TaloMotion is een anatomisch gevormde enkelsteun, speciaal ontworpen voor druk op de enkel en stabilisatie van de enkel. Deze enkelsteun combineert een 3D-breitechnologie met hoogwaardige breigarens en latexvrije materialen voor een beter ademend vermogen en duurzaam comfort.

Twee visco-elastische pelotten hebben een masserend effect op het zachte weefsel van het enkelgewricht voor verbeterde opname van bloeditstoringen en zwellingen. De speciaal ontworpen, drukvrije boorden met antislip breistruktuur voorkomen beklemming.

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

Indicaties:

Actimove® TaloMotion wordt gebruikt bij acuut enkelletsel aan laterale ligamenten (ruptuur van fibulair ligament), acute verstuiking van het kapsel en acute en chronische articulaire bloeditstoringen met ontstekingsverschijnselen en zwellingen (bijv. bij artrose of artritis). Het kan ook worden gebruikt voor de behandeling van chronische instabiliteit van het enkelgewricht en bij postoperatieve en posttraumatische irritatie (bijv. na verstuiking).

Contra-indicaties

Gebruik Actimove® TaloMotion niet voor de behandeling van fracturen van het scheenbeen en/of kuitbeen, gecompliceerd letsel aan het enkelgewricht of wanneer er sprake is van een verminderde bloedsomloop en veel vochtophoping in de tenen en de voet.

Gebruik:

1. Draai het bovenste deel van de Actimove® TaloMotion binnenstebuiten, totdat u het hielgedeelte stevig vast hebt. (Fig. 1)
2. Trek het verband over uw voet, tot aan uw hiel. (Fig. 2)
3. Draai het bovenste deel van het verband terug, totdat de pelotten zich direct onder de beenachtige uitsteeksels van de enkel bevinden. (Fig. 3)
4. Verstel de Actimove® TaloMotion naar behoefte. (Fig. 4)




















Let op: Uw Actimove® TaloMotion moet de eerste keer door een behandelaar of daarvoor opgeleide specialist worden aangebracht.

Reiniging & verzorging:

Actimove® TaloMotion kan met de hand of in de machine worden gewassen (programma voor fijne was op 30 °C/86 °F). Voor uw Actimove® TaloMotion geldt: geen bleekmiddel gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen.

Voorzorgsmaatregelen:

U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te volgen. Mocht u tijdens het dragen enig ongemak, een doof gevoel, veranderingen in uw huidskleur of zwelling ervaren, stop dan met het gebruik van Actimove® TaloMotion en neem contact op met uw behandelend arts.

Size	XS	S	M	L	XL	XXL
	17 - 19 cm 6 ^{3/4} " - 7 ^{1/2} "	19 - 21 cm 7 ^{1/2} " - 8 ^{1/4} "	21 - 23 cm 8 ^{1/4} " - 9"	23 - 25 cm 9" - 9 ^{3/4} "	25 - 27 cm 9 ^{3/4} " - 10 ^{1/2} "	27 - 29 cm 10 ^{1/2} " - 11 ^{1/4} "
						
 	73487-02	73487-03	73487-04	73487-05	73487-06	73487-07
 	73487-32	73487-33	73487-34	73487-35	73487-36	73487-37
 	73487-60	73487-62	73487-64	73487-66	73487-68	73487-70
 	73487-61	73487-63	73487-65	73487-67	73487-69	73487-71
						
 	73487-12	73487-13	73487-14	73487-15	73487-16	73487-17
 	73487-42	73487-43	73487-44	73487-45	73487-46	73487-47
 	73487-72	73487-74	73487-76	73487-78	73487-80	73487-82
 	73487-73	73487-75	73487-77	73487-79	73487-81	73487-83

80% Polyamide
20% Elastane

**LATEX
FREE
FORMULA**



BSN medical GmbH
D-22771 Hamburg, Germany
www.bsnmedical.com

Made in Germany

JBR 05040.02 02/2011